



Medicontur Orvostechnikai Kft.

Herceghalmi út 1.
Zsámbék, 2072

Termelési helyszín:

Dózsa György út 105.
Mechanikai Művek 124-es épület
Budapest, 1224

Telefon: +36 23 56 55 55

E-mail: orders@coloron.eu

Weboldal: www.coloron.eu

COLORON® Színtévesztés javító lencsék

1. **COLORON® LuxDim Deután vagy Protán** színtévesztést javító lencse gyenge, félárnyékos fényviszonyokhoz – 2. szűrő kategória
2. **COLORON® LuxBright Deután vagy Protán** színtévesztést javító lencse közepes és erős fényviszonyokhoz – 3. szűrő kategória

COLORON® Színtévesztés javító 3az1-ben Kezdő szett

1. COLORON® Színlátás javító 3az1-ben szemüveggészlet – Protán típus
 - 1.1 **COLORON® LuxDim** és **LuxBright** színlátásjavító klipek
2. COLORON® Színlátásjavító 3az1-ben szemüveggészlet – Deután típus
 - 2.1 **COLORON® LuxDim** és **LuxBright** színlátás javító klipek
3. Próbalencse készlet – 8 db
4. Diagnosztikai szoftver
5. Marketing anyagok
6. Oktatási anyagok

COLORON® Színtévesztés korrigáló 3az1-ben szemüvegszett

1. **COLORON® LuxDim** színtévesztést javító lencse gyenge, félárnyékos fényviszonyokhoz, az 1. clip-be illesztve – 2. szűrő kategória
2. **COLORON® LuxBright** színtévesztést javító lencse közepes és erős fényviszonyokhoz, a 2. clip-be illesztve – 3. szűrő kategória
3. COLORON® 3az1-ben szemüveg keret
4. COLORON® Keménytok
5. COLORON® Mikroszálas törülköző
6. COLORON® Mikroszálas szemüvegtartó tasak
7. COLORON® Termékdoboz

COLORON® Színtévesztés javító napszemüveg

1. **COLORON® LuxBright** színtévesztést javító lencse közepes és erős fényviszonyokhoz – 3. szűrő kategória
2. COLORON® Napszemüveg keret
3. COLORON® Keménytok



4. COLORON® Mikroszálas törlőkendő
5. COLORON® Mikroszálas szemüvegtartó tasak
6. COLORON® Termékdoboz

COLORON® Beltéri színtévesztés javító szemüveg

1. **COLORON® LuxDim** színtévesztést javító lencse gyenge fényviszonyokhoz – 2. szűrőkategória
2. COLORON® Beltéri keret
3. COLORON® Keménytok
4. COLORON® Mikroszálas törlőkendő
5. COLORON® Mikroszálas szemüvegtartó tasak
6. COLORON® Termékdoboz*

TERMÉKLEÍRÁS:

Minden COLORON® színtévesztést korrigáló lencse gondos kezelési folyamaton megy keresztül, és 100%-ban blokkolja az UVA/UVB/UVC fényt. A lencse védelme érdekében karcálló bevonatot kap, így biztosítva a hosszú távú használatot.

A COLORON® szemüvegek gyártását a Medicontur Orvostechnikai Kft. végzi, mely vállalat több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nagy pontosságú optikai rendszerek gyártásában a szemgyógyászat szakterületén.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT:

A COLORON® LuxBright és LuxDim lencse és szemüveg termékcsalád a vörös-zöld színtévesztő emberek számára készült a színmegkülönböztetés és az általános színérzékelés javítása céljából. Használatát sötét fényviszonyok között (például éjszaka) nem ajánljuk. A COLORON® szemüvegek mindössze látásjavító segédeszközök, és nem gyógyítják a színtévesztést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Első alkalommal történő viselés esetén a viselő várjon legalább 10 percet, amíg a szeme alkalmazkodik az új lencséhez. A gyorsabb színadaptáció érdekében a szemüveg felhelyezésekor mindig csukja be a szemét, majd nyissa ki, amikor a szemüveg már az arcán van. Az adaptálódás ideje alatt a hatás biztosítása érdekében ne vegye le a szemüveget.

A szemüveg felhelyezésekor minden tárgy először pirosnak/rózsaszínűnek fog tűnni. Ez a szem természetes alkalmazkodási folyamatának köszönhető. Az új és javított színegyensúly körülbelül 5-10 perc elteltével áll be. Amint egy eredetileg fehér fal vagy fehér papírlap újra fehérnek tűnik, a szeme alkalmazkodott a lencsékhez.

Az érzékelt eredmény a színtévesztés típusától és súlyosságától függően változik. A színlátást korrigáló szemüveg hatása fokozatosan növekszik. A maximális javulás néhány hónapos használat után érhető el – a legjobb eredmények elérése érdekében használja a szemüveget gyakran, világos és színes környezetben.

ÁPOLÁS: A kiegyensúlyozott látásminőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a terméket enyhe mosogatószerrel és meleg vízzel, öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra mikroszálas tisztítókendővel. A szemüveg szállításához használjon kemény tokot, így védve azt a külső behatásoktól. *

TÁROLÁS: A COLORON® lencsék és szemüvegek hűvös, száraz helyen, szélsőséges hőmérséklettől védve tárolandó, mivel ezek megsérthetik a lencsüket.

A HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA: A lencse nem használható olyan foglalkozások gyakorlásához, melyek esetében a színtévesztők korlátozva lehetnek, nem használható továbbá a színtévesztés szűrővizsgálatainak elvégzéséhez, hogy az ilyen foglalkozásokra való alkalmasságot az érintettek ily módon megszerezhessék. A COLORON® szemüvegszettet nem arra tervezték, hogy megvédje viselőjét az esetleges sérülésektől, és nem minősül védőeszköznek.

FIGYELEM: Az ANSI Z80.3-2018 szabvány 4.10.2.3. szakasza és az ISO 12312-1:2022 szabvány 5.3.2. szakasza szerinti spektrális áteresztőképességi követelmények szerint a LuxBright és LuxDim lencsék nem alkalmasak vezetésre és közúti használatra.

A Medicontur Kft. magasszintű minőségbiztosítása ellenére minimális színbeli eltérések előfordulhatnak a lencsék között, ez azonban a lencsék teljesítményét nem befolyásolja. Kérjük, figyeljen a lencsék kiválasztásakor arra, hogy színbeli különbség ne legyen azok között a lencsék között, amelyek egy keretbe kerülnek.

A színezett lencsék ronthatják a látási viszonyokat gyenge fényviszonyok között, és nem használhatók szürkületben, éjszaka.

A napszemüvegek nem alkalmasak a Nap közvetlen megfigyelésére vagy napfogyatkozások megfigyelésére. Ha a lencsék viselése fejfájást, hányingert vagy látásromlást okoz, hagyja abba használatát.






GARANCIA: Az alapkeretbe történő dioptriával rendelkező lencsét úgy szükséges kiválasztani, hogy a lencse az alapkeret síkjából ne lógjon ki, így elkerülve a szemüveg funkcionális-vesztését, valamint a használatból történő baleseteket. Helytelen lencsekiválasztás esetén a gyártó az okozott károkért felelőséget nem vállal.

Ha a COLORON® lencsére vagy szemüvegére vonatkozó garanciális igényt szeretné érvényesíteni, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati osztályunkkal a returns@coloron.eu e-mail-címen.

MEGFELELŐSÉG: A COLORON® lencsék és szemüvegek megfelelnek a 2016/425/EU rendeletnek, és az EN ISO 12312-1, ill. EN ISO 14889 szabványoknak. Nyilvántartási szám: HU-2021/02722-01691. A megfelelőségi nyilatkozat itt található: www.coloron.eu/dokumentumok.

SZELLEMI TULAJDONJOG: A COLORON® és a szem embléma a Medicontur Orvostechikai Kft. bejegyzett védjegye.

* A Harry nevű termékünk nem kemény tokban helyezkedik el, hanem mikroszálas szemüvegtartó tasakban.

Tab 1.		
0 TV 80-100%		
1 TV 43-80%		
2 TV 18-43%		
3 TV 8-18%		

CON_B2B_e-IFU_HU_v04
Hatálybalépés dátuma: 2023.10.03.